

フェイスシールド・透明マスクのご紹介。

- フィルム素材の中でも耐久性・耐熱性に優れており工場や飲食店にも最適。
- 透明の為、顔が見えます。
- 使用後はリサイクル可能。
- 飛沫の飛散を低減します。

フェイスシールド

- ・ 透明な為、視界も良好。
- ・ スポンジの厚みにより、メガネやゴーグルに干渉しません。
- ・ スポンジも柔らかく調整も可能な為、長時間の使用も疲れにくいです。

透明マスク

- ・ 暑さ軽減、息が楽にできます。
- ・ 鼻の上までしっかりカバーできます。

まるみえマスク by くもクン (実用新案申請済)


鼻の上までしっかりカバーでき、優しく洗ったり拭くことで繰り返し、使用できます。



FS-M-001



ストーンデコアレンジ例

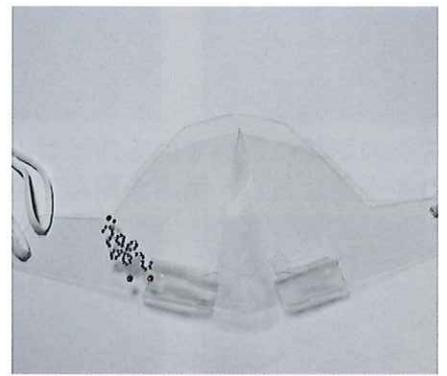

フェイスシールド

顎の部分まで覆えるタイプと切りっぱなしタイプの2種類から用途に合わせてお選びいただけます。



FS-S-001

Point1

アーチ状に覆うことで下からの侵入を防いだり、座っている人などへの飛沫の飛散防止に。

Point2


飲食をする際や香りの確認などではストレートタイプを使用。



FS-R-001

※マスクは感染を完全に防ぐものではありません。
使用中気分が悪くなられた時は、ご使用をおやめください。
運動用に開発されたものではありません。
マスク以外でのご使用はお控えください。

透明マスク組み立て方

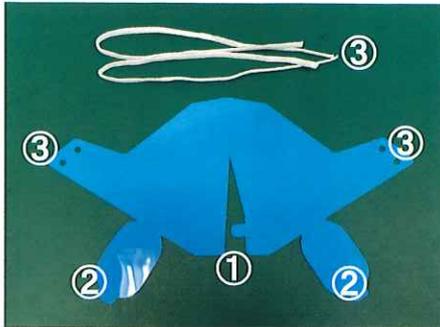

マスク本体 1枚
ゴム紐 2本

※フィルムに付いている保護シートは外してからご使用ください。

※組み立て方がわかり易いよう、色を付けています。
実際の色は透明です。

①の部分の突起をマスクの表面（外側）から裏面（口側）へ向かって切れ込みに差し込みます。

※立体にした際、盛り上がる方が表面、へこむ方が裏面になります。




※下写真のように余白が表に出ないようにしてください。




②の部分を裏面方向へ根元から直角に折り曲げ、先端のくびれ部分が表面に出るまでしっかりと差し込みます。差し込んだ先端は、マスク上方向に折り曲げてください。この作業を左右2箇所行います。

※切れ込みがきつい場合はカッターで調整してください。

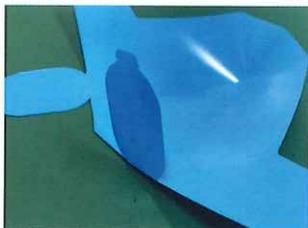


③マスクの両端に空いている穴にゴム紐を通します。
ゴム紐を通したら、両端を結んで完成です。

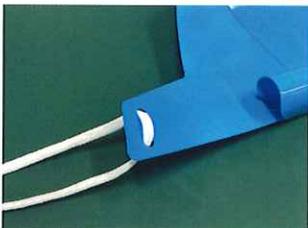

作り方動画はこちら



フェイスシールド組み立て方

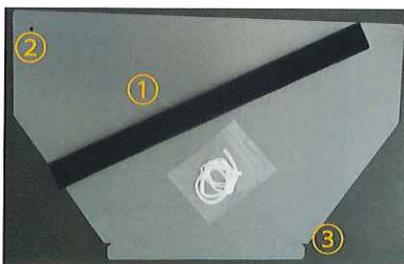

フィルム 1枚
テープ付スポンジ 1本
ゴム紐 2本

※フィルムに付いている保護シートは外してからご使用ください。



① フィルム長辺の両端に穴が開いているので、干渉しないようにテープ付スポンジを貼る。

② 紐の片方を穴に通し結ぶ。
(2ヶ所)

③ スリットがあり、両面テープで固定。
※FS-S-001のみ

株式会社 井口機工製作所

本社 〒178-0064 東京都練馬区南大泉 1-20-7
大阪支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 2-14-20
名古屋支店 〒453-0017 愛知県名古屋市中村区則武本通 1-34-601
福岡オフィス 〒806-0063 福岡県北九州市八幡西区市瀬 1-8-37-106
練馬工場 〒178-0064 東京都練馬区南大泉 1-22-9
府中工場 〒183-0035 東京都府中市四谷 5-40
茨城工場 〒315-0125 茨城県石岡市山崎 962-157

TEL.03-3923-1211 FAX.03-3923-8100
TEL.06-6192-7785 FAX.06-6192-7786
TEL.052-486-7557 FAX.052-486-7565
TEL.06-6192-7785 FAX.06-6192-7786
TEL.03-3923-1211 FAX.03-3867-0170
TEL.042-361-8783 FAX.042-360-7899
TEL.0299-46-5811 FAX.0299-46-5817

お問合せ先 日本ディック株式会社

名古屋支店 名古屋市中区松原2丁目12番10号
TEL 052-322-3661 FAX 052-322-2220
岐阜支店 羽島郡岐南町伏屋5丁目138番地1
TEL 058-247-9771 FAX 058-247-9024
URL <http://www.n-dic.co.jp> E-mail info@n-dic.co.jp